

Las recomendaciones a seguir según el material son las siguientes:

Material desechable:



CONOS DE OTOSCOPIO

- Son de un solo uso.
- No deben ser reutilizados.

Material que necesita limpieza:



ESFIGMOMANÓMETRO

- La parte textil debe lavarse con agua y detergente enzimático.
- El manómetro y las gomas se limpian cuidadosamente con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático.

▪ **OTOSCOPIO**

Se limpian con un trapo humedecido con

▪ **OFTALMOSCOPIO**

agua y detergente enzimático y se secan.

Material que necesita limpieza y desinfección de nivel medio:



ESTETOSCOPIO

- Se limpia con un trapo humedecido con agua y detergente enzimático (fundamentalmente la membrana y los auriculares) y se seca.
- Se desinfecta con alcohol de 70º la membrana de contacto.



TERMÓMETRO

- Se limpia con agua fría y detergente enzimático.
- Se desinfecta con alcohol de 70º.
- Se guarda limpio y seco.



PULSIOXÍMETRO

- Limpiar el aparato con detergente enzimático, aclarar con gasa humedecida en agua y secar por completo.
- Transductor: limpiar con detergente enzimático y secar; después desinfectar con gasa humedecida con alcohol de 70º